

BACTINYL WIPES

DESINFIOIVA PUHDISTUSLIINA

TUOTEKUVAUS

Pitkävaikutteinen, pehmeä ja männyntuoksuinen desinfiointiliina. Sopii hyvin erilaisten pintojen puhdistamiseen ja desinfiointiin esim. pöydät, tuolit, puhelimet, kahvat jne. Liinat on testattu ja hyväksytty myös sairaaloissa. Ne soveltuvat välineiden, kirurgisten instrumenttien, hoitopöytien, laitteiden, paarien ym. puhdistukseen sekä esidesinfiointiin. Liina on myös erittäin tehokas käsien desinfiointiin. Sisältää alle 5% alkoholia.

KÄYTTÖOHJE

Pyyhi kädet tai pinnat huolellisesti, vähintään 2 sekunnin ajan. Anna kuivua. Pintoja ei tarvitse huuhdella desinfiointin jälkeen (paitsi jos ne ovat välittömästi kosketuksessa elintarvikkeisiin). Sulje pakkaus huolellisesti käytön jälkeen. Ulos vedettyjä liinoja ei saa työntää takaisin pakkaukseen.



LIUKSEN TEHO

Bakteerit: NF EN 1040, NF EN 1276 likaiset olosuhteet, NFT 72-171, NFT 72-190

Hiivat: NF EN 1650 likaiset olosuhteet

Sienet, homeet: NF EN 1275

Virukset: NFT 72-180 Rotavirus, poliovirus, herpesvirus, HIV-1.

Liinon desinfiointiteho täyttää NFT 72-190 vaatimukset (Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Eschericia coli ja Candida albicans).

Liuksen koostumus: Stabiloitu peroksidi, kvaternäariset ammoniumkloridit (bentsalkoniumkloridi), etanoli < 5 %, hajuste (mäntyöljy).

KOODI: 120-LB920600